

BRUKS- OCH SERVICEANVISNING
MOBIL
VATTENMASSAGESYSTEM
UW-MOBIL

Innehåll:

1. Allmänna råd
2. Installation
3. Ibruktagande
4. Service
5. Desinficering
6. Teknisk information
7. Elinstallationsschema

LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER

DENNA MANUAL ÄR EN DEL AV BADET OCH SKALL ALLTID FINNAS TILLGÄNGLIG

1. Allmänna råd

UW-Mobil vatten massage apparat används med badkar eller terapipool.

Viktigt.

- 1.1.1. Barn som använder badet skall upphörligt övervakas då de badar.
- 1.1.2. Denna apparat får användas enbart av människor.
- 2.1.3. Använd alltid apparat enlighet med instruktionerna.
- 2.1.4. Använd apparat endast med utrustning levererad av tillverkaren – förändringar av apparat kan vara farliga.


1.2. Säkerhetsföreskrift för den badande

- 1.2.1. **Avnjut inte alkohol före badandet.** Intagande av mat före badandet kan förorsaka sömnhighet. Be läkaren om råd om du är ordinerad fortgående användning av medicin.
- 1.2.2. **Gravida kvinnor** skall konsultera läkare angående vattnets temperatur och badets längd.
- 1.2.3. **Små föremål** såsom örhängen, tvålbitar, hårspännen kan skada vattencirkulationssystem.

2. Installation

Apparat levereras från fabriken färdigt att användas. Efter kartongen har öppnat, kontrollera fullständighet av accessoarer. Fästa massage slang med kapsylmutter till tryckrör **A**. För att kontrollera rätta vattentryck, vrid stråle munstycke B (märkt med 2 ring, storlek 60 mm²) i messageslangen.

(lämna sugslang **E** lös tills vidare)

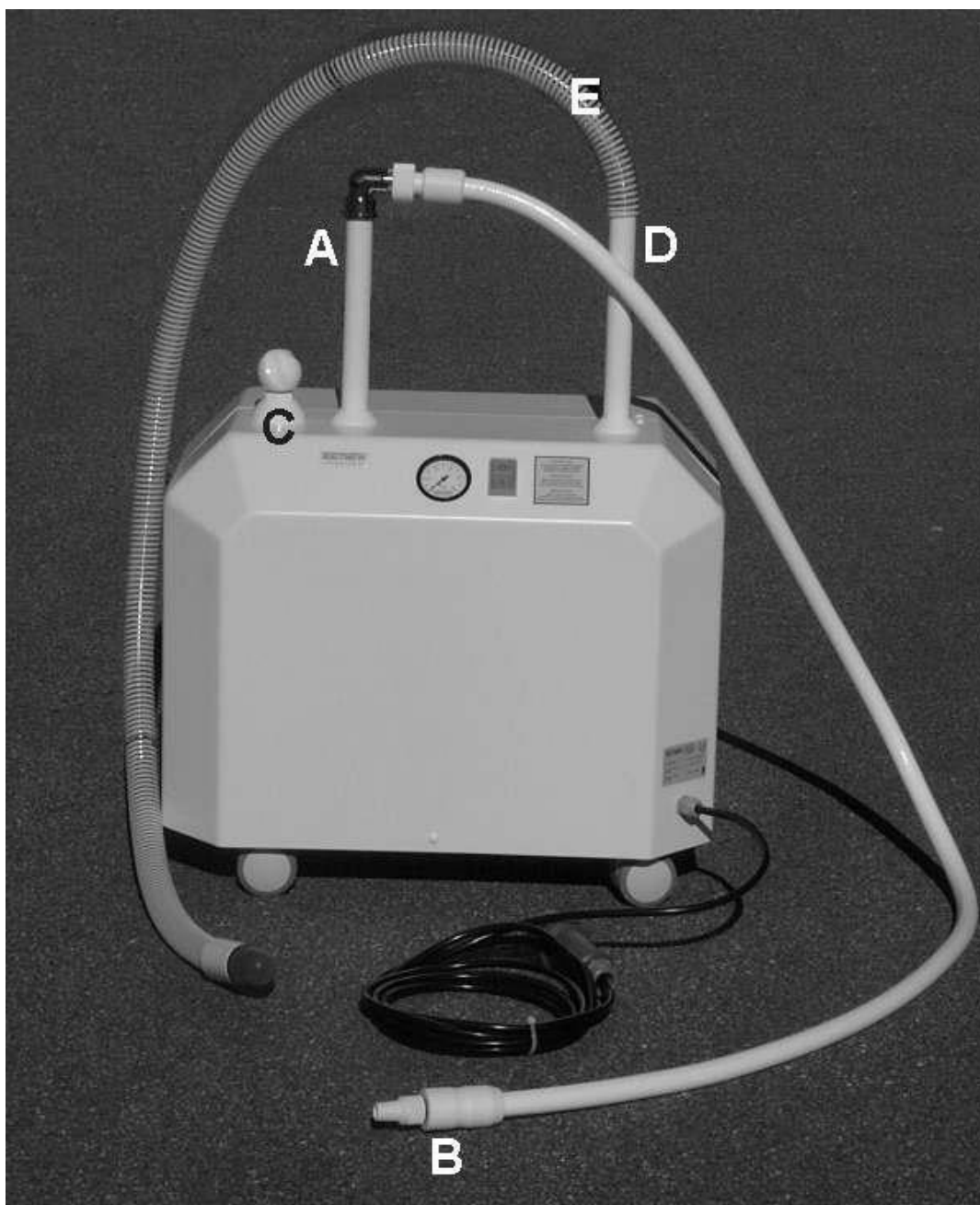

A = Tryckrör
B = Stråle munstycke
C = Ventil

D = Sugrör
E = Sugslang

3. Ibruktagande

3.1. Kontrollera att el-anslutning motsvarar specifikation av typ skylt: 400 V/ 50 Hz, 3/N/SL, effekt max 1,6 kW, 3 x 16 A, IP44.

3.2. Öppna reglering ventil **C**.

3.3. Häng fast massage slang i hållare.

3.4. Fyll up vatten så mycket som möjligt i sugrör **D**, tills sugrör är fullsatt (ventil **C** måste vara öppet).

3.5. Stänga av reglering ventil **C**.

3.6. Fästa sugslang **E** till sugrör **D** och sätt sugslang i badkar eller pool vatten.

3.7. Fästa apparatens CEE plugg till anslutningsdosa och startar apparaten genom att tryck på "ON".

3.8. Ta massage slang med bastant tag i handen och vänd stråle munstycke mot vatten.

3.9. Öppna ventil försiktig och kontrollera trycket. Tryckmätare skall visa på 3 bar med stråle munstycke B (märkt med 2 ring, storlek 60 mm²). Om trycket är lägre, se punkt 3.11.

3.10. Stäng av ventil och stäng apparat genom att tryck på "OFF". **Det är mycket viktigt att stänga ventil C för följande orsak:**

- a) När apparaten startas, vatten stänks ner i rummet.
- b) Apparaten kan tömmas förorsaka att sug- eller massageslang häng på golvet
- c) Om apparaten är tom, pumpen får inte användas. **Torrgång måste undvika!**
- d) Apparaten är alltid färdig att fungera.

3.11. Om trycket är lägre än beskriven i punkt 3.9., cirkulerar pumpen i fel riktning. I detta fall fasen i plagget måste bytas vid behörig servicetekniker.

3.12. Om apparaten används i olika stället (anslutningsdosa) kan pumpens cirkulation byttas på samma sätt.

4. Service

Kontrollera en gång per år, att slangarna och ventiler är i bra form. Byt vid behov. Mer information om apparatens service tel.

(i Sverige) tel. 08-512 415 35 eller 0706 05 12 46

5. Desinficering

Användaren av badet är i enlighet med DIN VDE 0750 del 224, IEC 601 del 1 och VDE 0750 del 1 6.8.2 regler, skyldig att utföra behövliga desinficeringar av anläggningen. Med denna behandling desinficeras apparatens yta och speciellt pumpens cirkulationssystem med för professionellt bruk utvecklade desinficeringsmedlen Adisan WS pulver.

Desinficerings utförs 1 månaders mellanrum eller före en längre tid av uppehåll i användningen t.ex. semestertid.

1. Fyll 20 l hink med varmt vatten och tillsätts 1 dl Adisan WS rengöringsmedel. Sugslang och massageslang skall sättas i hink.

2. Startar apparaten genom att tryck på "ON" och öppna ventil försiktig. Kontrollera vattens normalt cirkulation 5 minuter.

3. Stäng av ventil och stäng apparat genom att tryck på "OFF". Sätt sugslang i badkar eller pool vatten och startar apparaten igen, sätt massageslang i golvbrunn eller i tom hink.
4. Öppna ventil försiktig och spola pumpen med rent vatten ca 30 s. (så att Adisan WS sköljs port av cirkulation system). Stäng av ventil igen. Ny är UW-Mobil desinficerad.

Apparatens yta ska rengöra med vanliga tvättmedel och en fuktig duk eller svamp. Vid rengöringen får inte rengöringsmedel, som innehåller lösningsmedel vilka förorsakar färgfel, användas.

6. Teknisk information

Yttre mått;

UW-Mobil Längd x bredd x höjd, ungefär

690 x 450 x 600 mm

Elanslutning

400 V/ 50 Hz, 3/N/SL, effekt max 1,6 kW, 3 x
16 A, IP44.

Pumpens kapacitet

200 l/min

Motorskydd strömbrytare, isolering transformator 230/24 V TÜV

ON/OFF strömbrytare

CE - symbol

Messageslang inkl. stråle munstycket: 40/60/80/100/120/140 mm²

Viktigt! Anläggningen får inte användas i utrymmen där explosionsrisk finns. Service och reparation av anläggningen får endast göras av leverantören godkända personer.

Obligatoriska säkerhetsanordningar :

Jordfelsbrytare 2-polig, högst 30 mA

Elektrisk installation enligt DIN IEC/VDE

14. Elinstallationsschema:

